

# cobas<sup>®</sup> PCR Dual ou Uni Swab Sample Kit


Pour *Chlamydia trachomatis* et *Neisseria gonorrhoeae*

## Instructions<sup>1</sup> pour l'autoprélèvement d'échantillon vaginal

### Préparation avant le prélèvement d'échantillon :


- Se déshabiller pour pouvoir accéder à la zone vaginale.
- S'installer dans une position confortable.
- Retirer le tube de prélèvement ainsi qu'un seul écouvillon de la trousse de prélèvement.

Si vous utilisez le cobas<sup>®</sup> PCR Media Dual Swab Sample Kit, veuillez ne pas utiliser l'écouvillon floqué pour le prélèvement d'échantillons vaginaux.  
Ne pas tremper l'écouvillon dans le milieu cobas<sup>®</sup> PCR ou autre liquide avant d'exécuter le prélèvement

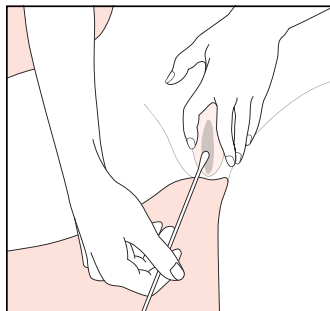


#### 1. POSITIONNER :

Tenir l'écouvillon tissé d'une main et, de l'autre main, séparer les plis de peau autour de l'ouverture du vagin (lèvres). **Ne pas toucher** ou déposer l'embout de l'écouvillon sur une surface. Sinon, utiliser le second écouvillon fourni.

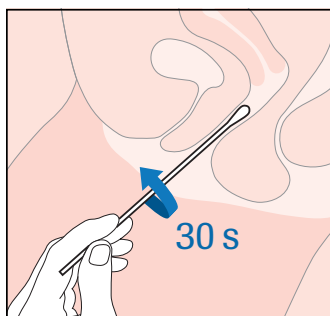

#### 2. PRÉLEVER :

**Insérer** l'écouvillon tissé dans l'ouverture vaginale à une profondeur d'environ **5 cm (2 po)**. Faire tourner doucement l'écouvillon environ **30 secondes** tout en le frottant contre les parois vaginales. Retirer délicatement l'écouvillon. S'assurer que l'écouvillon **ne touche aucune surface** avant de le placer dans le tube de collecte.

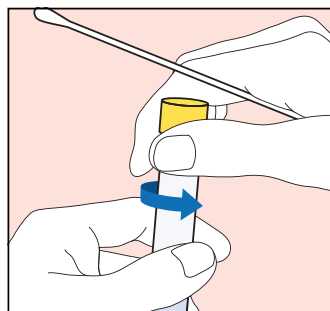


#### 3. OUVRIR :

Retirer le bouchon du tube à l'aide de la main tenant déjà l'écouvillon tissé, tel qu'indiqué sur l'illustration ci-contre.


#### 4. ALIGNER :

**Insérer** l'écouvillon tissé dans le tube jusqu'à ce que la **ligne noire** visible sur la tige soit alignée avec le rebord du tube. L'extrémité de l'écouvillon devrait se situer juste au-dessus de la surface du liquide dans le tube.

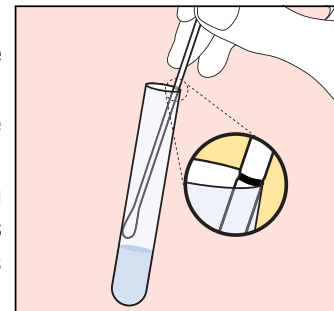

#### 5. ROMPRE :

Incliner avec précaution l'écouvillon tissé contre le rebord du tube et **rompre la tige au niveau de la ligne noire**. Jeter la partie supérieure de l'écouvillon.

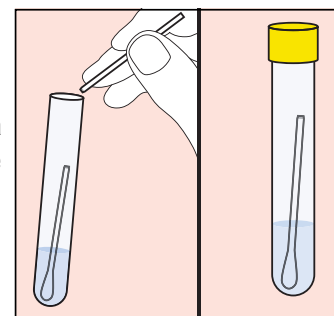

#### 6. FERMER :

Refermer le tube en serrant bien le bouchon. **Retourner** l'échantillon à votre professionnel de la santé tel qu'indiqué.

**Si vous utilisez le cobas<sup>®</sup> PCR Media Dual Swab Sample Kit, jetez le deuxième écouvillon (écouvillon floqué) non utilisé.**

#### PRÉCAUTIONS DE MANIPULATION :

**Le contenu du tube de prélèvement peut entraîner des irritations en cas de contact avec la peau ou d'autres parties du corps.**

**En cas d'éclaboussure ou de déversement accidentel du contenu du tube, ne pas nettoyer soi-même. Prévenir immédiatement un professionnel de la santé.**

**Transport :** entre 2°C et 30°C ▪ **Stabilité du prélèvement :** 12 mois

#### L'ÉCHANTILLON SERA REJETÉ S'IL Y A :

- Présence de deux écouvillons dans un même tube
- Absence d'écouvillon ou écouvillon floqué dans un tube
- Excès de sang (>5%)



<sup>1</sup> Les personnes qui exécutent ou dirigent le prélèvement d'échantillons doivent consulter le mode d'emploi complet.